

DR-HO'S

therapy *pro*



Guía rápida | P. 4



Manual de instrucciones | P. 7

Gel Conductor | P. 21

El Therapy Pro del DR-HO es muy eficaz, gracias al uso estimulaciones profesionales tipo TENS, EMS y NMES. Deberá aplicarse el gel conductor entre la superficie de la piel a tratar y los electrodos.

Consulte el Manual de Instrucciones, donde encontrará indicaciones de seguridad y consejos para que el uso de su Therapy Pro sea lo más fácil y agradable posible y alargar así la vida útil de su Therapy Pro.

IMPORTANTE

- Asegúrese de que la unidad de control está en posición OFF antes de introducir las pilas.
- Para garantizar una conectividad adecuada, deberá aplicar una cantidad generosa del Gel Conductor de Electroterapia del DR-HO y de 5 a 7 pulverizaciones en los cuatro electrodos circulares. Frote bien el gel en el tejido y asegúrese de que los electrodos estén humedecidos por completo, incluidos los bordes. Si lo desea, también puede pulverizar el gel sobre el cuello y frotarlo suavemente.
- Encienda el dispositivo lentamente girando la rueda. Después, elija un programa y la duración que desee.

TENGA EN CUENTA

Therapy Pro es un dispositivo médico de clase 2A. Esto significa que es importante leer atentamente el Manual y la Guía rápida antes de cada uso.



Dr. Michael Ho



Gracias

Gracias y enhorabuena por adquirir Therapy Pro. Ha tomado una decisión inteligente e importante con respecto al autotratamiento y el cuidado. Muchas personas se han sorprendido gratamente con el grado de mejora que han experimentado gracias al uso de este dispositivo de última generación, y usted también descubrirá cómo le ayuda a mejorar su calidad de vida y a reducir la tensión.

Therapy Pro del DR-HO es un dispositivo sofisticado pero fácil de usar, útil para toda la familia. Este exclusivo sistema consigue un alivio rápido y eficaz de muchas de sus dolencias, desde tensión muscular hasta dolores crónicos o agudos.

Nuestro objetivo es desarrollar productos únicos y eficaces que ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresarle nuestro más sincero agradecimiento a usted, como cliente, por su apoyo.

Lea atentamente el contenido de este manual antes de utilizar el dispositivo por primera vez y consérvelo para consultarlo en el futuro.

¡Que disfrute con salud y felicidad!

Dr. Michael Ho
Especialista en dolor y cefaleas



- 1 Introduzca 2 pilas tipo AAA en el compartimento de la parte trasera del dispositivo de control. Recomendamos usar pilas alcalinas porque proporcionan un nivel estable de alimentación hasta que se gastan.

2 Terapia Cervical



- A Conecte el cable de la almohadilla de terapia cervical al dispositivo de control.



- B Quítese los collares y joyas que tenga en el cuello.



- C Para conseguir mejores resultados, aplique gel conductor en la espalda y en el cuello.



- D Rocíe generosamente el gel con el pulverizador por toda la superficie y los bordes de los 4 electrodos.



- E Distribuya el gel por los electrodos con los dedos y asegúrese de que quedan bien humedecidos.



- F Coloque los brazos en los reposabrazos y tire del dispositivo para que los electrodos entren en contacto con la piel.



- G Puede usar el Therapy Pro sentado, de pie o también tumbado.

2 Parches corporales



- A Enchufe el conector del juego de parches que vaya usar (grandes o pequeños al dispositivo de control. El conector es por dentro de color amarillo.



- B Retire la lámina transparente antes de aplicar los parches corporales.



- C Antes de cada uso, rocíe una pequeña cantidad de gel conductor sobre los parches, empleando el pulverizador que se le suministra.



- D Consulte el esquema de colocación de electrodos que hay más adelante.

Nota: el sistema SOLO funciona si se adhieren al cuerpo los dos parches del mismo juego.



- E Aplique los parches a la zona del cuerpo que desea tratar. Asegúrese de que los parches no se toquen.



- F Cuando no vaya a utilizarlos, guarde siempre los parches de electrodos con la lámina transparente de protección puesta.



3 Gire el interruptor a la posición de encendido (ON). A continuación, aumente la intensidad lentamente hasta que sus músculos comiencen a moverse por sí mismos.



4 Pulse el selector de Modo para elegir entre los modos A, B o C. Una luz intermitente indicará el modo seleccionado.



5 Pulse el botón de TIME para seleccionar el tiempo de tratamiento (10, 20 o 40 minutos). Una vez terminado el tratamiento, apague el dispositivo; si quiere volver a utilizarlo, enciéndalo de nuevo y programe el tiempo que desee.

¡Siéntese, relájese y disfrute de su masaje!




THERAPY PRO DEL DR-HO



ALIVIA EL DOLOR Y LA TENSIÓN



MEJORA LA CIRCULACIÓN

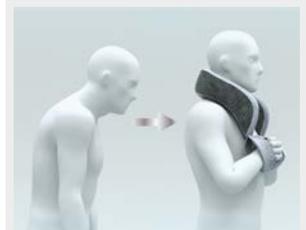

FAVORECE UNA BUENA POSTURA

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LOS PARCHES



Cuello y hombros



Codos y antebrazos



Hombros



Muñecas



Manos



Caderas



Lumbares



Muslos



Lumbares y glúteos



Glúteos y muslos



Rodillas



Espinillas



Pantorrillas



Tobillos



ÍNDICE

Información.....	7	Uso de los parches de electrodos... 16	
Precauciones de seguridad	8	Limpieza y mantenimiento	16
Especificaciones técnicas	12	Resolución de problemas	17
Diagrama de partes.....	13	Símbolos	19
Programas de tratamiento.....	14	Compatibilidad electromagnética....	20
Pilas.....	15	Garantía	20

INFORMACIÓN

El Therapy Pro del DR-HO es un dispositivo doméstico versátil de nueva generación basado en la física, la microelectrónica moderna y la práctica clínica. Estimula los músculos sanos y aumenta la circulación sanguínea local, mejorando y facilitando el rendimiento muscular y aliviando temporalmente el dolor asociado a músculos sobrecargados y doloridos de la espalda, cervicales, extremidades superiores (hombros y brazos) e inferiores (piernas). Utiliza la corriente eléctrica para estimular los nervios y aliviar el dolor crónico e intratable y el dolor asociado a la artritis o el relacionado con la tensión muscular.

Este Dispositivo de Terapia del Dolor (Modelo: P.T.S- IIB) está destinado a aliviar el dolor asociado a los músculos doloridos de la zona lumbar, hombros,

brazos y nuca cuya dolencia se asocia a la tensión producida por el ejercicio o las actividades cotidianas, principalmente las actividades domésticas y laborales habituales.

Este producto está homologado como dispositivo médico en la Unión Europea conforme a la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios por SGS CE1639, exclusivamente para las indicaciones de alivio del dolor asociado a músculos sobrecargados o doloridos.

Otros usos no médicos descritos para este dispositivo no están dentro del ámbito de homologación CE, y los usuarios deben ser conscientes de que el rendimiento y/o la seguridad del producto no han sido evaluados por SGS para esos fines.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Se desconocen los efectos a largo plazo de la electroestimulación intensa.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. EL DISPOSITIVO PUEDE RESULTAR PELIGROSO SI LO UTILIZAN DETERMINADAS PERSONAS VULNERABLES.

NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO:

- Si lleva implantado un **marcapasos**, un desfibrilador u otro dispositivo metálico o electrónico. El uso de este dispositivo en esos casos podría provocar descargas eléctricas, quemaduras, interferencias eléctricas o incluso la muerte.
- Cerca de equipos de imagen por resonancia magnética (RM). Este dispositivo no es seguro en esos entornos.
- Si es probable que se produzca una hemorragia.
- Si hay
 - tensión arterial anormalmente elevada;
 - síndromes de dolor no diagnosticados;
 - tendencia a la hemorragia interna;
 - epilepsia.
- Tras intervenciones quirúrgicas recientes si la estimulación puede interrumpir el proceso de cicatrización.
- En las proximidades del útero en caso de menstruación o embarazo.

- Cerca de sus ojos, cabeza o cara.
- Junto con dispositivos electrónicos médicos, como un corazón o un pulmón artificiales, o un respirador.
- En presencia de equipos de monitorización electrónica (por ejemplo, monitores cardíacos, alarmas de ECG), ya que puede provocar un mal funcionamiento.
- Sobre áreas insensibles de la piel.
- Sobre heridas abiertas, erupciones cutáneas, zonas inflamadas, enrojecidas, infectadas o inflamadas o erupciones cutáneas (por ejemplo, flebitis, tromboflebitis, varices) o encima o cerca de lesiones cancerosas.

NO USE LOS PARCHES DE ELECTRODOS:

- En los lados opuestos de la cabeza, porque los efectos de la estimulación cerebral son desconocidos.
- No aplique los electrodos en la cabeza, la cara, la parte frontal y lateral del cuello, la garganta o en ambos lados del tórax al mismo tiempo.
- No estimule los nervios del seno carotídeo, especialmente en pacientes con hipersensibilidad de dicho seno.
- No estimule la parte delantera del cuello o de la boca, porque esto podría causar espasmos musculares severos que podrían provocar el cierre de las vías respiratorias, con la consiguiente dificultad respiratoria, o bien



efectos adversos en el ritmo cardíaco o en la presión sanguínea.

- En el pecho, porque el efecto de la corriente eléctrica en el corazón puede causar arritmias cardíacas.
- Sobre heridas abiertas, erupciones cutáneas, zonas inflamadas, enrojecidas o infectadas o erupciones cutáneas (por ejemplo, flebitis, tromboflebitis, varices) o encima o cerca de lesiones cancerosas.
- Sobre zonas insensibles de la piel.
- Si siente algún tipo de irritación o enrojecimiento en la piel tras el uso del dispositivo, no prolongue la estimulación en esa zona hasta que vuelva a su estado normal.

NO UTILIZAR EN ESTAS PERSONAS:

- Niños o bebés, ya que el dispositivo no ha sido diseñado para uso pediátrico.
- Personas que hayan perdido sus facultades mentales.
- Mujeres embarazadas.

Si sospecha que sufre o le han diagnosticado una enfermedad coronaria o epilepsia, pida consejo a su médico.

SIN EMBARGO, SI PIENSA QUE PUEDE DISFRUTAR DE LAS VENTAJAS DE ESTE SISTEMA Y DESEA INTENTARLO, CONSULTE ANTES A SU MÉDICO.

NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS:

- Mientras está tomando un baño o ducha.
- Mientras duerme.
- Mientras conduce, maneja maquinaria o realiza cualquier actividad de riesgo. El tratamiento puede provocar movimientos involuntarios de los brazos y causar somnolencia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS PARCHES

- Aplique los parches solo sobre piel sana, seca y limpia. No los coloque sobre heridas ni en piel dañada, ya que interrumpir el proceso de cicatrización.
- Si experimenta irritación o enrojecimiento después de usar este dispositivo, siga usándolo en esa zona de la piel hasta que vuelva a la normalidad.
- Los dos parches del set deben colocarse en el cuerpo al mismo tiempo para que funcionen. Asegúrese de que los parches no se toquen ya que, de lo contrario, no se sentirán los impulsos.
- Si siente molestias o síntomas anormales durante tratamiento, deje de utilizar el dispositivo y consulte con un médico antes de reanudar el tratamiento.
- Si tiene algún problema con la puesta en marcha, el mantenimiento o la utilización de

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- este aparato, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y reporte cualquier incidente. No intente arreglar el dispositivo por su cuenta.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de bebés, niños o mascotas. La inhalación o ingestión de piezas pequeñas es peligrosa y puede ser mortal.
 - Utilice únicamente accesorios especificados o autorizados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados puede dañar el aparato o poner en peligro al usuario.
 - No utilice el aparato en estancias húmedas, como el cuarto de baño o el lavabo, ya que podría dañarse.
 - Durante el tratamiento, asegúrese de mantener alejados de los electrodos los objetos metálicos con capacidad conductora, como collares, cinturones y anillos.
 - Si utiliza pilas recargables de 1,5 V, asegúrese de utilizar un cargador de pilas homologado por la CE. No conecte nunca directamente el dispositivo al cargador de pilas ni a ningún otro equipamiento eléctrico.
 - No utilice el aparato si hay en el ambiente una mezcla inflamable de gas anestésico, oxígeno comprimido u óxido nítrico.
 - Si el aparato no funciona correctamente o si siente molestias durante su uso, debe dejar de utilizarlo.
 - Utilice el aparato sólo para los fines para los que se ha concebido.
 - No utilice el dispositivo cerca de un teléfono móvil, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS PARCHES DE ELECTRODOS

- Aplique los electrodos solo en piel normal, sana y limpia y sin agua. No los utilice sobre heridas o piel dañada ya que puede interrumpir el proceso de cicatrización.
- Si desea mover los electrodos a otro lugar del cuerpo durante un ciclo de tratamiento, apague primero el aparato, luego mueva los electrodos y, por último, reanude el tratamiento.
- No doble ni pliegue los parches, ya que podría provocar fallos de funcionamiento.
- Guarde siempre los parches cubiertos con la película protectora transparente cuando no se vayan a utilizar.
- No aplique ningún disolvente ni ningún otro líquido (excepto agua o el gel conductor del DR-HO) sobre los parches o sobre su piel, ya que podrían provocar que estos no se adhieran y funcionen mal. Los parches están recubiertos de gel y se adhieren a la piel humedeciéndolos.
- Si siente que los parches están secos o provocan irritación, rocíelos con un poco de Gel Conductor.
- La conexión simultánea de un paciente a un equipo quirúrgico

de alta frecuencia puede provocar quemaduras en el lugar donde se han conectado los electrodos de este dispositivo y posiblemente dañe incluso al propio dispositivo.

- No deje los parches pegados a la piel una vez finalizado el tratamiento.
- La colocación de los electrodos y los ajustes de estimulación deben basarse en las instrucciones del profesional que los prescribe.
- No comparta los parches con ninguna otra persona porque puede causarle una infección o irritación en la piel. Cada persona debe de tener su propio juego de parches individuales para uso personal.

IMPORTANTE:

- Los **dos electrodos** de un juego deben colocarse **a la vez** en el cuerpo para que funcionen. Asegúrese de que los electrodos no entren en contacto uno con el otro porque, en tal caso, no se sentirán impulsos.
- No mantenga los electrodos puestos en una misma zona de la piel durante más de 40 minutos cada vez, ya que podría provocar irritaciones cutáneas.

Deje de utilizar los parches si el embalaje individual ha estado abierto durante más de tres meses o si pierden su capacidad de adherencia.

Consulte en la Guía Rápida las instrucciones para el usuario y la colocación de electrodos.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS CABLES

- No doble ni tire del extremo del cable.
- Sustituya el cable cuando esté roto o deteriorado.
- Los cables largos pueden causar estrangulamiento. Tenga cuidado al utilizar cables alrededor del cuello y los hombros.
- Para garantizar la eficacia de la terapia, asegúrese de que los cables están correctamente conectados y acoplados al dispositivo y que los parches se encuentran firmemente adheridos a la zona de la piel que desea tratar.

NOTA:

No trate una misma zona durante periodos prolongados (más de 40 minutos por sesión, hasta 3 veces al día) porque los músculos de esa zona pueden quedar agotados y doloridos.

Debe utilizar exclusivamente los cables, los parches de electrodos y el gel que le recomendamos porque el uso de otros accesorios no autorizados puede provocar daños en el dispositivo o suponer un peligro para el usuario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

REACCIONES ADVERSAS

Puede experimentar:

- Irritación de la piel o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al gel electroconductor.
- Irritación cutánea y quemaduras debajo de los electrodos cuando se aplican sobre la piel.

- Dolor de cabeza y otras sensaciones dolorosas durante o después de la aplicación en las proximidades de los ojos y en su cabeza o cara.

DEBE DEJAR DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CONSULTAR A SU MÉDICO SI EXPERIMENTA ALGUNA REACCIÓN ADVERSA.

¡CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	DC 3.0V, 2 pilas AAA
Método de aislamiento de la corriente de línea	Tipo BF
Número de canales de salida	1
Número de programas de salida	3
Nivel de intensidad de salida	5 niveles
Rango del temporizador	10, 20, 40 min
Peso	Mando de control: 74 g; Dispositivo cervical: 470 g; Parches pequeños: 10 g; Parches Flex-Tone: 37 g
Dimensiones	Dispositivo: 12 x 7 x 2 cm; Therapy Pro: 48 x 27 x 10 cm; Parches corporales pequeños: 46 x 46 mm; Parches FlexTone: 80 x 120 mm
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 5~40 °C; Humedad: ≤80% HR; Presión atmosférica: 86~106 kPa
Entorno de almacenamiento	Temperatura: Dispositivo: -20 ~ 55 °C; Electrodo: 5~40 °C; Humedad: ≤95% RH; Presión atmosférica: 50~106 kPa
Caducidad	Parches de electrodos: 1 año; Dispositivo Therapy Pro: 10 años (dependiendo del cuidado y de los daños que pueda sufrir)

DIAGRAMA DE PARTES

Dispositivo de control (modelo P.T.S-IIB)

Este aparato es el elemento central del sistema de su Therapy Pro. Puede utilizarlo con la almohadilla cervical o con los parches de electrodos. Elija el programa y la duración del tratamiento fácilmente y sin tener que agacharse. Todo al alcance de la mano.



Salida de electrodos

Conexión con la almohadilla cervical o con los parches de electrodos.

Selector de intensidad

Aumenta o disminuye la intensidad del tratamiento girando esta rueda.

Botón de programa

Puede optar entre tres programas con diferentes intervalos de intensidad.

Botón de Tiempo

Puede elegir entre 3 duraciones de tratamiento: de 10, 20 y 40 minutos. El tratamiento finalizará automáticamente al terminar el programa elegido. Si lo desea, puede prolongar la duración del tratamiento seleccionando de nuevo un programa con la duración que prefiera.

Almohadilla cervical

Diseño ergonómico, adaptado al contorno cervical y con funda transpirable.

Broche de sujeción

Se puede usar para sujetarlo alrededor de la mochila de equipaje mientras viaja o alrededor del cuello.

Reposabrazos

Coloque los brazos en los reposabrazos y empuje hacia abajo para asegurarse de que los electrodos queden firmemente presionados contra la piel.

4 electrodos integrados

Se ha demostrado clínicamente que ayudan a relajar los músculos tensos, mejorar la circulación y aliviar el dolor.

Aplique generosamente el Gel Conductor del DR-HO'S sobre toda la superficie de los electrodos antes de usarlos y vuelva a aplicar cada 30 minutos durante el tratamiento o si experimenta un ligero escozor.



Gel conductor para electroterapia del DR-HO

Este gel patentado ha sido desarrollado para humedecer tanto los electrodos como la piel, el contacto entre la superficie del electrodo y la piel y garantizar un tratamiento más cómodo y eficaz.



Mini pulverizador

Para aplicar el gel conductor sobre la superficie y los bordes de los electrodos.



Parches de electrodos reutilizables

Los parches corporales, disponibles en dos tamaños, proporcionan un tratamiento eficaz en zonas específicas del cuerpo (ver página 6).

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

TERAPIAS:	A	B	C
	Para aumentar temporalmente la circulación sanguínea local y la relajación.	Alivio sintomático y tratamiento del dolor crónico e intratable y del dolor asociado a la artritis. Estimulación de los músculos sanos para mejorar y facilitar el rendimiento muscular.	
¿Cuánto dura la terapia?	Depende del tiempo seleccionado. La terapia finaliza automáticamente.		
¿Cómo personalizo la terapia?	Usted mismo selecciona el programa y la intensidad (del nivel 1 al 5).		
Cuánto tiempo debo utilizar el dispositivo y con qué frecuencia?	Cada sesión debe durar entre 30 y 40 minutos. No realizar más de 3 sesiones al día.		
¿Cuándo debo dejar de utilizarlo?	Cuando el dolor haya remitido o cesado, si el tratamiento resulta incómodo, en caso de reacción adversa o si la enfermedad empeora.		

Nota: muchas personas sienten un alivio inmediato del dolor muscular, mientras que otras necesitan varios días de uso regular para sentir los beneficios. Los resultados varían y dependerán de las afecciones subyacentes y de la frecuencia de uso. Si el dolor no remite, puede probar a aumentar la intensidad o cambiar el programa.

PILAS

Inserte 2 pilas AAA antes de usar:

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte posterior.



2. Inserte las pilas correctamente de la manera que indican las marcas.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Notas importantes

- Si la carga de las pilas es baja, el aparato perderá su eficacia. Por favor, ponga pilas nuevas siempre que note que la estimulación se debilita. Se recomienda utilizar pilas alcalinas como fuente de alimentación estable.
- Si los indicadores luminosos se atenúan o si siente una estimulación muy débil en su piel, esto puede ser un indicativo de que la batería está baja.

¡ADVERTENCIAS!

- Sustituya las pilas por otras del mismo tipo o equivalente, según recomiende el fabricante: 2 pilas alcalinas AAA (1,5 V).
- No deseche las pilas con la basura doméstica normal, recíclelas en un punto de recogida oficial de acuerdo con la normativa local que regula la eliminación de este tipo de materiales.
- Si no va a utilizar el Therapy Pro durante un periodo largo de tiempo (tres o más meses) es recomendable que antes de guardarlo, quite las pilas para evitar que se gasten.
- Si el aparato se utiliza una vez al día durante unos 30 minutos por sesión, un par de pilas alcalinas AAA debería durar entre 3 y 6 meses.
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas porque proporcionan un nivel de energía constante hasta que se agotan. Las pilas no alcalinas y recargables tienden a disminuir su nivel de potencia con el tiempo, y usted podría pensar erróneamente que el aparato no funciona bien porque el tratamiento no es tan potente.

USO DE LOS PARCHES DE ELECTRODOS

- Lave bien la piel y séquela antes de aplicar los electrodos.
- Coloque los parches de los electrodos sobre la piel bien estirados.
- No utilice parches de electrodos que no se adhieran bien a la piel o que sólo lo hagan parcialmente.
- Si la piel se enrojece después del tratamiento, no debe tratar esa zona hasta que el enrojecimiento haya desaparecido.
- Los parches de electrodos pueden reutilizarse entre 30 y 50 veces, dependiendo del tipo de piel y de otros factores. Si nota que los parches no se adhieren bien a la piel o que están secos, aplíqueles un poco de gel o agua con la mano o con el pulverizador (no las lave directamente con agua). Esto ayudará a restaurar la adherencia y conductividad de los parches.
- Si al humedecer los parches no consigue que vuelvan a estar pegajosos, es posible que sea necesario sustituirlos.
- Utilice únicamente los parches de electrodos, el gel y los cables originales suministrados por el fabricante, ya que es posible que otros parches y cables no sean eléctricamente compatibles con su dispositivo.
- Los parches sólo deben ser utilizados por la misma persona para evitar reacciones cutáneas o contaminación cruzada.
- Apague siempre el aparato antes de retirar o cambiar de posición los electrodos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Dispositivo:

- Utilice un paño húmedo o un limpiador neutro para limpiar la superficie.
- No utilice líquidos volátiles, como alcohol, disolvente o gasolina.
- Mantenga su dispositivo Therapy Pro siempre alejado de humedad, altas temperaturas, luz solar directa o gotas de agua.
- No desmonte, repare ni trate de modificar de forma alguna el dispositivo usted mismo, ya que invalidará la garantía.

Parches corporales:

- No pegue nunca dos parches de electrodos uno cerca del otro.
- Mantenga limpios los parches y no los exponga nunca a altas temperaturas ni a luz directa del sol.
- Mantenga los parches a una temperatura entre 5 y 40 °C.
- Limpie suavemente los parches de electrodos con un paño húmedo o utilice un cepillo para eliminar el polvo.
- No limpie los electrodos con agua caliente ni productos químicos.
- No toque el gel de los parches con los dedos ya que podría reducir su adherencia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	PRUEBE ESTA SOLUCIÓN
El dispositivo parece que no funciona correctamente.	Los dos parches no están bien colocados.	Adhiera bien los parches al cuerpo y asegúrese de que no están en contacto entre sí.
	Los cables de los parches de electrodos no están conectados correctamente al dispositivo de control.	Asegúrese de que los cables están conectados entre sí y con el dispositivo.
	El conector del cable no está correctamente conectado al puerto de salida situado en la parte superior del Dispositivo.	Introduzca firmemente el enchufe el puerto de salida del Dispositivo.
	Los impulsos eléctricos se debilitan.	Gire el dial de intensidad ON/OFF en el sentido de las agujas del reloj.
	La potencia se está agotando.	Cambie las pilas, aunque las haya comprado recientemente.
	Los parches de los electrodos no hacen contacto con la piel.	Presione los electrodos firmemente sobre la piel.
	El recubrimiento de gel del parche de electrodos está seco o sucio.	Humedezca los parches de gel con un poco de agua o sustitúyalos por otros nuevos.
	La piel está cubierta de aceite o alguna loción que impide que los parches se adhieran.	Lávese la piel con agua e intente volver a ponerse los parches.
El aparato deja de funcionar antes de finalizar el tratamiento.	Las pilas se han agotado.	Cambie las pilas.
	La clavija del cable no se ha introducido completamente en el puerto de salida.	Vuelva a conectar la clavija en el puerto de salida.
	Los cables de electrodos no están conectados.	Vuelva a conectar los cables o los parches al cable principal que va al Dispositivo.
Parpadean tres luces amarillas del mando y no se siente ninguna estimulación.	Uno de los parches se ha despegado de su piel o un cable está desconectado.	Vuelva a pegar los parches a la piel o vuelva a conectar el cable. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo para reiniciarlo.
Parpadean tres luces verdes y no se siente ninguna estimulación.	Se ha activado el temporizador de apagado automático y el dispositivo se ha apagado.	Gire el botón de rueda hasta la posición OFF. Luego, vuelva a girarlo hasta la posición ON.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	PRUEBE ESTA SOLUCIÓN
La piel se ha enrojecido y/o pica o escuece.	Se trata de una reacción eléctrica a los electrodos.	Deje de utilizar la máquina hasta que averigüe la causa de la irritación de la piel.
	Tiene un pequeño corte o acné.	No coloque los electrodos sobre piel recién afeitada, zonas que hayan sufrido picaduras de insectos, rasguños, acné o cualquier herida abierta.
	La superficie adhesiva de los parches está sucia o demasiado seca.	Lave suavemente la superficie adhesiva de los parches con las yemas de los dedos durante unos 3 segundos bajo un pequeño chorro de agua.
	La terapia se ha prolongado demasiado.	Utilice el aparato durante un máximo de 40 minutos por sesión y no más de 3 veces al día.
	Los dos parches no están bien adheridos a la piel.	Pegue los dos parches firmemente a la piel para garantizar un contacto total.
	La superficie de los parches está desgastada.	Sustituya el juego de parches.
Se han puesto las pilas pero la luz no se enciende.	El compartimento de las pilas está sucio y los conectores están bloqueados.	Examínelo y límpielo.
	Las pilas no están completamente cargadas o no se han instalado correctamente.	Sustituya las pilas o instálelas correctamente en el compartimento.
	Hay un problema con los conectores del compartimento de las pilas.	Intente tirar ligeramente de los conectores hacia fuera con una pequeña pinza.
	El dial se ha girado a la posición OFF y luego a la posición ON.	Gire de nuevo el dial a la posición OFF y luego a la posición ON.

SÍMBOLOS

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	NÚMERO DE SERIE. Este símbolo estará acompañado por el número de serie del fabricante.
	CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
	Identificador único de dispositivo (UDI); el Identificador de aplicación (01) representa el identificador de dispositivo (DI) ("0697074222XXXX"), el identificador de aplicación (11) el fecha de producción/fecha de fabricación ("YYMM-DD", con "YY" los dos últimos dígitos del año de producción, "MM" el mes de producción y "DD" el día de producción), el Identificador de la aplicación (21) el número de serie del dispositivo ("XXXXXXXXXXXX").
	Dispositivo médico.
	Indicación de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en las Directivas europeas 0120 y 1639 - Identificación del organismo notificado (SGS).
	FECHA DE FABRICACIÓN. Este símbolo estará acompañado por la fecha de fabricación.
	FABRICANTE. Este símbolo estará acompañado por el nombre y la dirección del fabricante.
	REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA Este símbolo irá acompañado del nombre y la dirección del representante autorizado en la Comunidad Europea, junto al símbolo.
	No desechar con el resto de residuos domésticos.
	Pieza aplicada tipo BF.
IP22	Clasificación IP.
	¡ATENCIÓN! ¡Precaución! ¡Siga las instrucciones de uso! De lo contrario, podría poner en peligro al paciente o al dispositivo
	Código de lote.
	NO SEGURO PARA RM. Este dispositivo no se puede introducir en el área de acceso restringido de un sistema de imagen por resonancia magnética (IRM).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El Dispositivo Therapy Pro del DR-HO ha sido probado y cumple con los límites de compatibilidad electromagnética (EMC) para dispositivos médicos. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable

contra interferencias perjudiciales en una instalación médica típica.

PRECAUCIÓN: no utilice este dispositivo simultáneamente con dispositivos que tengan altos niveles de EMI.

GARANTÍA

Por la presente garantizamos que si este producto funciona mal o falla de alguna manera en el plazo de tres años a partir de la fecha de compra, el comprador no tendrá que pagar ninguna de las piezas necesarias ni los costes de mano de obra en que se incurra para reparar el aparato defectuoso, si se utiliza en condiciones normales y de acuerdo con este manual de instrucciones. Esta garantía sólo es válida si el comprador puede presentar una prueba de compra.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



El símbolo de basura tachado indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Elimine sus aparatos eléctricos o electrodomésticos a través del sistema local de recogida y reciclaje de residuos. Puede obtener más información sobre eliminación y reciclaje en su centro local de eliminación de residuos, en la tienda donde compró el producto o del fabricante.



Gel Conductor de Electroterapia



DR-HO'S

Electro Therapy Conductive

Use with TENS, EMS or other electrotherapy devices to increase the effectiveness of your treatment. **Utilizar con TENS, de EEM u otros dispositivos de electroterapia para un tratamiento más agradable y efectivo. Utilizar con TENS, EEM ou outros dispositivos de electroterapia para un tratamiento mais confortável e eficaz. Utilizar con TENS ou autres appareils d'électrostimulation pour un traitement plus agréable.**

For external use only. Do not use if you are allergic to any of the ingredients. **Solo para uso externo.** No utilize el gel sobre piel irritada o dañada. **Apenas para uso externo.** Não utilize o gel sobre a pele irritada ou danada. **A usage externe.** Ne pas utiliser le gel sur une peau abîmée ou si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.

External use only. Do not ingest. Adult use only. Keep out of reach of children. Do not use on irritated skin with open wounds, rashes, infected areas, skin ulcers, or on children. Use on intact, clean and healthy skin. If you experience any adverse effects, discontinue use and consult your physician. Do not reuse used gel. **Advertencias:** Solo para uso externo. No ingerir. Uso solo para adultos. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar el gel sobre la piel irritada, con heridas abiertas, erupciones, zonas infectadas, erupciones o úlceras cutáneas. Utilizar solo sobre piel limpia y sana. Si experimenta efectos adversos, deje de utilizar el gel y consulte a su médico. **Advertências:** Uso apenas para uso externo. Não ingerir. Reservar apenas para adultos. Manter fora do alcance das crianças. Não utilizar o gel sobre a pele irritada, com feridas abertas, erupções cutâneas, áreas infectadas, erupções ou úlceras cutâneas. Utilizar apenas em pele limpa e saudável. Se tiver efeitos adversos, descontinue o uso e consulte o seu médico. **Advertências:** Usage externe uniquement. Ne pas avaler. Réserver à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser le gel sur une peau irritée, avec des plaies ouvertes, des éruptions cutanées, des zones infectées ou des ulcères cutanés. N'utiliser que sur une peau propre et saine. Si vous ressentez des effets indésirables, cessez l'utilisation et consultez votre médecin. **Advertências:**

GEL CONDUCTOR DE ELECTROTERAPIA DEL DR-HO

Uso previsto

El gel conductor para electroterapia de DR-HO se ha concebido para usarse en terapias de estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS) y de electroestimulación muscular (EEM), para humedecer los electrodos y la piel, reducir el contacto entre la superficie del electrodo y la piel y garantizar un tratamiento más confortable y efectivo.

Advertencias

1. El gel conductor para electroterapia es apto exclusivamente para uso externo y siempre se debe aplicar sobre la piel y el parche de electrodo limpios.
2. Las características de este gel afectan a la seguridad y la eficacia de la estimulación eléctrica.
3. Este producto se ha concebido para uso exclusivo por adultos mayores de 18 años.

Contraindicaciones

1. No lo utilice si es alérgico a alguno de sus ingredientes.
2. No aplique el gel sobre piel dañada con heridas abiertas, sarpullidos, zonas infectadas, erupciones cutáneas o cualquier otra afección de la piel.

Reacciones adversas

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si siente reacciones adversas provocadas por el gel conductor.

Precauciones

1. El gel conductor se debe utilizar con dispositivos de estimulación nerviosa transcutánea (TENS), de electroestimulación muscular (EEM) y otros dispositivos de electroestimulación comercializados legalmente.
2. Siga siempre las instrucciones, tome las debidas precauciones y tenga presentes las contraindicaciones.
3. No combine el gel con agua ni con ninguna otra sustancia.
4. Antes de usarlo por primera vez, aplique una pequeña cantidad de gel sobre la piel para verificar la ausencia de reacciones alérgicas.
5. Es muy común que se produzca un ligero enrojecimiento de la piel tras un tratamiento de electroterapia debido al aumento de circulación sanguínea en la zona tratada. Debe desaparecer con el tiempo.
6. La aparición de inflamación o de una erupción importante indica irritación de la piel y reacción alérgica. Siempre consulte a su médico si le preocupa algún aspecto relacionado con su salud.
7. Si percibe irritación o enrojecimiento importantes en la piel tras el uso del gel, deje de aplicárselo en esa área de la piel. Lave la piel con agua y deje que se recupere antes de volver a realizar de nuevo un tratamiento de prueba sobre esa misma área. También puede realizar la prueba en otra zona de la piel para ver si experimenta una reacción similar.

8. Guarde el gel en un lugar seguro lejos del alcance de los niños o las mascotas para evitar la ingestión accidental.

Composición

Este producto es un gel transparente compuesto por agua purificada, carbopol, glicerina, hidróxido de sodio y triclosán.

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: 5-40 °C
Humedad: ≤95 % HR
Presión atmosférica: 50-106 kPa
Periodo de conservación: 2 años

Modelo: DHGEL
250 g / botella

USO

Lea detenidamente las instrucciones antes del uso para garantizar los mejores resultados.

Paso 1: llene el minipulverizador que se suministra con el producto.

Paso 2: aplique generosamente el gel por toda la superficie de los electrodos, incluso a los bordes. Utilice el dedo para distribuirlo uniformemente.

Paso 3: vuelva a pulverizar más gel sobre los electrodos para asegurarse de que quedan bien humedecidos.

Paso 4: para tratamientos prolongados, dosifique más gel sobre los electrodos cada 30 minutos o si percibe cualquier ligera sensación punzante durante el tratamiento.

Nota: si tiene la piel seca o con mucho vello, la aplicación directa de gel sobre el área de la piel a tratar facilitará la conducción eléctrica, el confort y la efectividad del tratamiento de electroterapia.

SÍMBOLOS

1		Símbolo de marcado CE. Este símbolo certifica que un producto satisface los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la Unión Europea.
2		No esterilizado.
3		Indica el fabricante del dispositivo médico, según se define en las directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE.
4		Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.
5		Consulte el manual o las instrucciones antes de cada uso.
6		FECHA DE FABRICACIÓN. Este símbolo estará acompañado por la fecha de fabricación.
7		No reutilizar.
8		¡Precaución!
9		Conservar y guardar en un lugar seco.
10		Evitar la exposición a la luz solar.
11		¡NO DESECHE ESTE PRODUCTO CON EL RESTO DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS!
12		Este lado hacia arriba.
13		Frágil, manipular con cuidado.
14		Número de serie.
15		Límite de temperatura.



Alivio rápido de dolores de cabeza, cuello y espalda.

Advertencia: el Therapy Pro no ha sido diseñado como sistema de diagnóstico, tratamiento ni cura de ningún tipo de enfermedad o afección. Si usted tiene problemas de salud o padece cualquier dolor, debe consultar con su médico para el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Precauciones: no utilice este dispositivo ni ningún otro estimulador electrónico si lleva un marcapasos o si está embarazada, debido a problemas de seguridad desconocidos. Si tiene alguna duda o preocupación, consulte a su médico antes de utilizarlo.

Importado por CIL Marketing Directo S.L.
Avenida de Manoterapas, 50 – 28050
Madrid - España
CIF: B85987071

Para el servicio de atención al cliente
póngase en contacto con su proveedor.



Guang Zhou Xinbo Electronic Co Ltd.
23 Building, The Second Phase, Huachuang
Animation Industry Park, Panyu, Guangzhou,
Guangdong Province, 511450 P.R. China



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



